

## RTA

### SAMOLEPICÍ HEMOSTATICKÁ NÁPLAST

- Čistá bavlna, pevná a elastická.
- Nelepí se na kůži ani do rány.
- Ideální pro citlivé ruce.
- Ruce mohou být mokré nebo špinavé.
- Impregnováno dezinfekčním a hemostatickým přípravkem.
- Odolává vodě, oleji, tukům, písku,...
- Bez použití nůžek
- IFA-standardy pro použití v nemocnicích.



## RESCUE TAPE

### Základní informace

RESCUE TAPE je samolepicí hemostatická náplast v pásce. Lze aplikovat na mokré nebo dokonce špinavé ruce.

RESCUE TAPE je vyrobena z bavlny, která je napuštěna dezinfekčním a hemostatickým přípravkem.

### Technické informace


Schváleno v souladu s normami IFA pro použití v nemocnicích.  
Skladovatelnost: 1 rok v suchu, nejlépe při teplotě +10°C až +30°C.  
Čistá bavlna.

Krycí folie.  
Dezinfekční a hemostatické ošetření.  
Uchovávejte na suchém, chladném a mrazuvzdorném místě.  
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

### Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:**
  - Odtrhněte cca. 25 cm. Odstraňte ochranný papír. Omotejte prst a konce pásky slepte k sobě. Obtočte do spirály. Stlačte vyčnívající obvaz na špičce prstu a pro fixaci obvaz na konci prstu lehce srolujte nahoru. Může být také použit jako horký obklad několikanásobným přeložením látky.
- **APLIKACE:**
  - k péči o drobné ranky na prstech
  - snadné odtržení při aplikaci
  - odolný vůči vodě, oleji, tukům, písku,...
  - ideální pro citlivé ruce

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
T151100	Rescue Tape	2m	BEZPEČNOST A HYGIENA

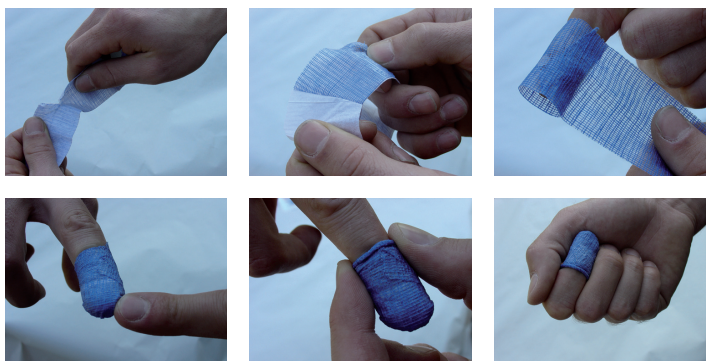

### Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby i uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

