

RTA

HEMOSTATIČNI ZAVOJ ZA PROFESIONALNU PRIMJENU

- Proizveden od pamuka, jak i elastičan.
- Ne lijepi se za kožu i ranu.
- Štiti ozlijeđene prste.
- Jednostavna primjena, nisu potrebne škare.
- Savršen za osjetljivu kožu.
- Može se staviti na mokre ili prljave ruke.
- Otporan na vodu, masnoću, ulje, pijesak,...
- U skladu sa IFA standardima za primjenu u bolnicama.



RESCUE TAPE

OPĆE INFORMACIJE

RESCUE TAPE je samoljepivi hemostatični zavoj koji se može staviti na mokre, pa čak i prljave ruke.

RESCUE TAPE je proizveden od impregniranog pamuka, sadrži dezinficijens, a ujedno je i hemostatičan proizvod.

TEHNIČKE INFORMACIJE


U skladu sa IFA standardima za primjenu u bolnicama. Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

Rok trajanja: minimalno 5 godina. Čuvati na suhom mjestu, po mogućnosti na temperaturi od +10°C do 30°C.

PRIMJENA I UPORABA

- **UPORABA:**
Otkinite otprilike 25 cm zavoja. Uklonite zaštitni papir. Stavite zavoj oko prsta, stavite jednu stranu na drugu, nježno pritisnite. Omotajte spiralno oko prsta. Vrh pritisnite zajedno i zavrnite kraj malo prema gore kako biste namjestili zavoj. Također se može koristiti kao kompresna ako ga presložite nekoliko puta.
- **PRIMJENA:**
 - za obradu malih rana na prstima.
 - jednostavna primjena.
 - otporno na vodu, ulje, masnoće, pijesak, ...
 - idealno za primjenu na osjetljivoj koži ruku.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
T151100	Rescue Tape	2 m	ZDRAVLJE I ZAŠTITA

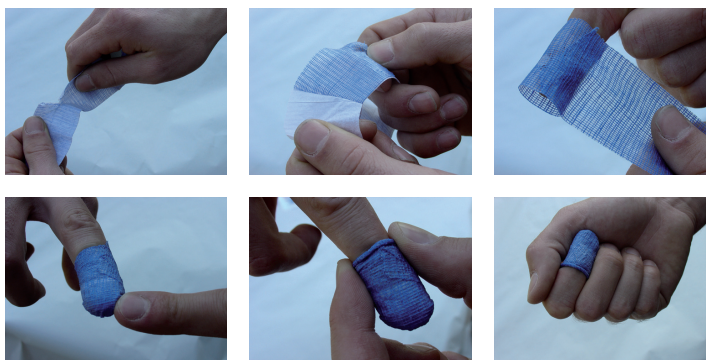

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju uporabu. Novo-systems d.o.o. ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu uporabu. Jedine obveze tvrtke Novo-systems d.o.o. su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novo-systems d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

