

BCR

GYORSAN HATÓ ALKOHOLOS FERTŐTLENÍTŐSZER

- Felhasználásra kész fertőtlenítő
- Etanol alapú
- Üledék- és illatanyag mentes
- Nehezen hozzáférhető helyek fertőtlenítésére is használható



BACTO CLEAN RTU

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BACTO CLEAN RTU egy aldehid mentes, etanol alapú, azonnal használható, gyors és hatásos felületfertőtlenítő.

A BACTO CLEAN RTU speciálisan a nehezen hozzáférhető felületek fertőtlenítésére is alkalmazható. Illatanyag- és üledékmentes.

A BACTO CLEAN RTU különösen jól használható gyors felület fertőtlenítésre az élelmiszeriparban, üzemi konyhákban, mosdókban, zuhanyzóknak, irodákban és az egészségügyi intézményekben.

TECHNIKAI ADATOK



Megjelenés: folyadék
Szín: színtelen
Illat: enyhén alkoholos
pH érték (20°C-on): 6-8
Olvadáspont: < -10°C
Kezdő forráspont: kb. 85°C
Lobbanáspont: 24°C
Alsó robbanási határ: 3,4 Vol%

Öngyulladás hőmérséklet: > 425°C
Sűrűség (20°C-on): kb. 0,932 g/m³
Vízoldhatóság (20°C-on): oldható
Oldószer tartalom: < 50%
Engedély száma: 51318-3/2020/JIF
A hatékonyság spektruma és behatási idők: lásd alkalmazási területek fejezetben és a termék címkéjén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁS:**
 - Biocid termékekről szóló rendelet szerint: az alkoholnak ellenálló orvosi eszközök és mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása. Alkalmas az élelmiszeriparban és a menzák konyháiban történő felhasználásra is.
 - Ezenkívül különösen jól használható irodákban, mosdókban és zuhanyzóknak is.
- **HASZNÁLAT:**
 - A hígíthatatlan oldatot egyenletesen vigye fel az alkohollal szemben ellenálló felületre, ügyelve arra, hogy ne maradjanak kezeletlen felületek. Tartsa nedvesen a felületet a szükséges behatási időig. A behatási idő letelte után a felület szárazra törölhető, vagy hagyja megszáradni. A kezelt felületet nem kell leöblíteni vízzel.
 - A BACTO CLEAN RTU fertőtlenítő folyadék felhordható a felületre törülközővel vagy permetként.
- **ANTIMIKROBIÁLIS SPEKTRUM:**
 - Baktericid, yeasticid, tuberkulocid, mycobactericid, szelektív virucid (adenovírus inaktíváló hatás)
- **BEHATÁSI IDŐK:**
 - baktericid, yeasticid hatás: 1 perc
 - mikobactericid hatás (tisztá felületen): 1 perc
 - szelektív virucid hatás (tisztá felületen): 5 perc

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T465001	Bacto Clean RTU	1l	lásd csomagolás + 36 hónap	EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

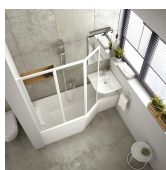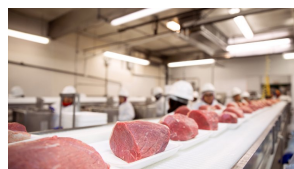

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációknak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

