

## RTA

### SAMOLEPLJIV POVOJ ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV

- Močan in prožen 100% čisti bombaž.
- Se ne zalepi na kožo, kakor tudi ne na rano.
- Enostaven za uporabo.
- Primeren za občutljivo kožo.
- Roke so lahko vlažne ali umazane.
- Prepojen je s sredstvi za dezinfekcijo in za zaustavljanje krvavitev.
- Odporen na vodo, olja, masti, pesek, ...
- Uporaba škarij ni potrebna.
- Ustreza IFA standardu za uporabo v bolnišnicah.



## RESCUE TAPE

### Splošne informacije

RESCUE TAPE je samolepljiv, hemostatičen povoj, ki ga lahko uporabljate na mokrih ali celo umazanih rokah.

RESCUE TAPE je izdelan iz bombaža, ki je prepojen z razkužilom in hemostatičnim izdelkom.

### Tehnični podatki

Ustreza IFA standardu za uporabo v bolnišnicah.


Rok uporabe: minimalno 5 let, shranjujte v suhem prostoru pri temperaturi med +10°C in 30°C.

### Navodila in uporaba

- NAVODILA:
- Odtrgajte trak dolžine ca. 25 cm. Odstranite zaščitno folijo. Trak ovijte okrog prsta tako, da se plasti prekrivajo in zlepijo. Povoj pritisnemo na blazinico prsta in nato ob prst, da se prilega. Z nekajkrat preloženo gazo ga lahko uporabimo za kompresijski povoj.

- UPORABA:
- - za oskrbo majhnih ran na rokah
- - enostavna uporaba
- - odporen na vodo, masti, olja, pesek,...
- - primeren za občutljivo kožo.

Šifra	Naziv	Vsebina	Skupina
T151100	Rescue Tape	2m	VARNOST IN ZAŠČITA

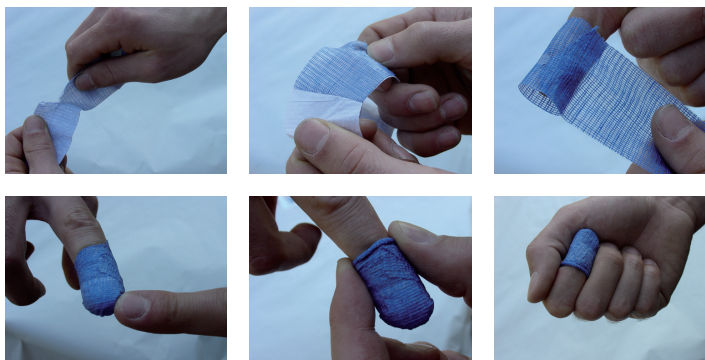

### Opombe

Vsi opisi uporabe in pripadajoče upodobitve so neobvezni. Podani so v prepričanju, da so pravilni. Vsak uporabnik pa mora sam preizkusiti primernost posameznega izdelka za predvideno uporabo. Podjetje Tech-Masters ne zagotavlja, da so informacije točne in popolne in odklanja vsako odgovornost v zvezi z uporabo opisanih izdelkov. Podjetje Tech-Masters odgovarja le za obveznosti, ki so navedene v standardnih prodajnih pogojih za določeni izdelek. Podjetje Tech-Masters ne odgovarja za posredno škodo, ki nastane s prodajo in preprodajo, z uporabo in napačno uporabo izdelka.



VARNOST IN ZAŠČITA

WWW.TECH-MASTERS.EU/SI

